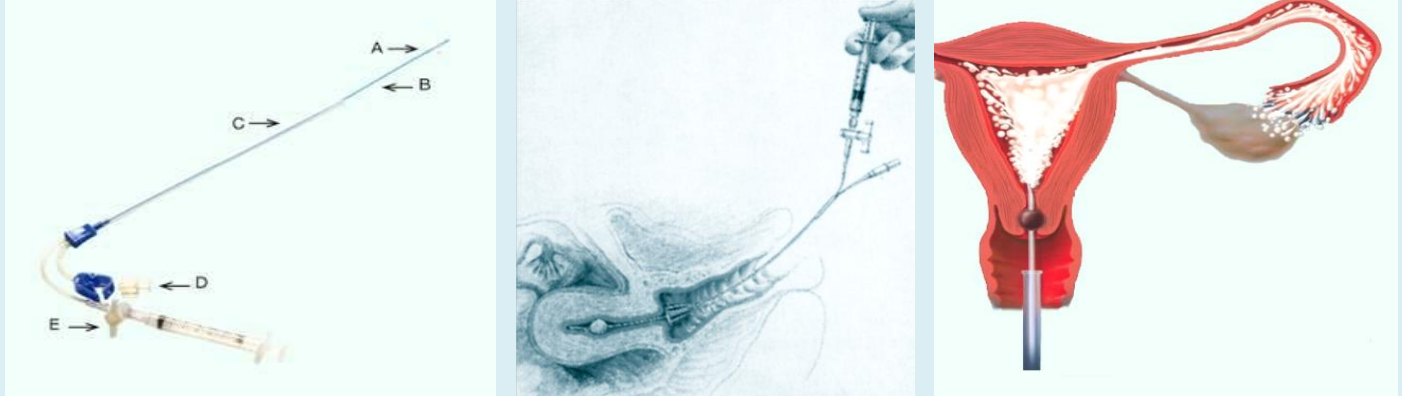


HSG Kateterleri

HSG işlemi, ekojenik kontrast madde veya salin kullanarak, X Ray veya ultrason ile tubal açıklığın incelenmesi anlamına gelir. Rahim filmi çekirtmek için ayakta gelen hastalarda tubal açıklığın gözden geçirilmesi, rahim ve tüplerle ilgili **Salpingo Grafi ve Salpingo Sonografi** işlemi uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayakta gelen hastalara Tubal açıklığın kontrolünü, bu kateter ile anestezi ve ağrı olmadan, basit bir şekilde test etmek mümkündür. Tüplerin incelenmesi için Şekil verilebilen entegre mandreni ile servikal kanala uyumlu, kolay yerleştirilebilen en iyi **HSG** kateteridir.

**A. Balon****B. Mil****C. Plastik Yerleştirme Kılıfı****D. Luer Lock****E. Musluk**

Çocuk sahibi olmak isteyenlerde, tubal açıklığın kontrolü kaçınılmaz bir gerekliliktir: Yumurta ile spermin birleşebilmesi için temel gereksinim, fallop tüplerinin açık olmasıdır. Geçirilmiş tubal inflamasyonlar ve dış gebelik bozulmuş tubal geçiş için en sık görülen sebeplerdir. Bu durum kısır çiftlerin yaklaşık % 25 inde görülmektedir.

- Sebebi belirsiz kısırlık
- İnseminasyon tedavisi
- Dış gebeliğin tubal cerrahi ile haledilmesi
- FSH veya HMG gibi ilaçlar ile stimülasyon tedavisi
- Miyomektomi sonrası
- Yumurta kanalının mikro cerrahi ile ameliyatı sonrası



HSG kateterin avantajları:

- Uçtaki yan gözler, enjeksiyon sırasında uterus duvarı tarafından kapatılmaz.
- Yuvarlatılmış, yumuşak, küt uç, yumuşak bir geçiş sağlar ve minimum travma yaratır.
- Yerleştirme kılıfı tenakulum ihtiyacını azaltır ve servikal kanal geçişini kolaylaştırır.
- Latex içermeyen ve sıvı sızdırmayan çift katlı balonu ve şişirmek için önceden ayarlı steril enjektörü vardır.
- 10 luk ambalajlar halinde 5 Fr ve 7 Fr ölçülerinde düz ve şekil verilerek biçimlendirilen iki tipi mevcuttur.

Uygulama :

- Balonu şişirerek test edin. Kateterin içine opak madde veya saline enjekte ederek havasını alın. Yerleştirme kılıfını dış servikal kanala yerleştirin ve uygun konuma ulaşana kadar kateteri servikal kanaldan uterusa doğru ilerletin.
- Uygun konuma ulaştıktan sonra yerleştirme kılıfını yerine takın ve sıvının dışarı akmasını önlemek için, önceden ayarlı şırıngayı kullanarak HSG kateterinin ucundaki balonu şişirin (5 Fr için 1.5 cc, 7 Fr için 3 cc) ve musluğunu kapatın.
- Son olarak, opak maddeyi rahim boşluğuna vererek üzerindeki klempini kapatın ve incelemeye başlayın.

Not: Küçük ve stenotik servikal kanallar için katetere sertlik vermek için mandren (**TMI1156**), Şekil verilebilen HSG Kateterleri (**TMI1185**, **TMI1187**) veya EZ-INJECT HSG (**TMI1162**) kateterlerinden birini kullanınız.

Dikkat:

- Yağlar, balon ile reaksiyona girip balonun gözenekli hale gelmesine neden olduğu için yağ içeren kontrast maddeler ile kullanılmamalıdır. Yağ bazlı kontrast medyumlar ile **e-Zinject HSG Kateteri (TMI1162)** kullanılabilir. Ürünler CE sertifikasına sahiptir Etilen Oksit ve Gama radyasyon ile steril edilmiştir. Tek kullanım için tasarlanmıştır.

Ürün Açıklaması	Model	Ürün Açıklaması	Model
HSG Kateteri 5 Fr	TMI1154	Şekil Verilebilen HSG Kateteri 5 Fr	TMI1185
HSG Kateteri 7 Fr	TMI1155	Şekil Verilebilen HSG Kateteri 7 Fr	TMI1187
Miller Advance HSG Kateteri	TMI2000	Steen Open Tip HSG Kateteri 5 Fr	TMI1188
e-Zinject HSG Kateteri	TMI1162	Steen Open Tip HSG Kateteri 7 Fr	TMI1189